



Patienten-
information

Nicht-chirurgische Parodontalbehandlung

Auf Wiedersehen, Parodontitis

leading regeneration

Geistlich

Ursachen

Zahnfleischerkrankungen verstehen: wichtige Fakten

Warum gesundes Zahnfleisch wichtig ist

Parodontitis ist eine chronische bakterielle Entzündung, welche das Zahnfleisch und den Kieferknochen schädigt. Parodontitis ist eine weit verbreitete, aber oft unbemerkte Krankheit.

Immer einen Schritt voraus

Ohne Behandlung kann Parodontitis zum Zahnverlust führen. Durch rechtzeitige Therapie und regelmässige Kontrolle können jedoch schwerwiegenden Eingriffe wie Operationen verhindert werden.

Risikofaktoren

Rauchen, schlechte Mundhygiene, schlechte Ernährung, Diabetes und Alter können die Gesundheit des Zahnfleisches beeinträchtigen. Proaktive Massnahmen können einen grossen Unterschied machen.



Zahn und Zahnfleisch gesund

Gesundes Lächeln: Zahnfleisch und Zähne in perfekter Harmonie.



Frühe Anzeichen einer Zahnfleischentzündung (Gingivitis)

Erste Warnung: Entzündung und Zahnfleischbluten deuten auf eine Erkrankung hin.



Fortgeschrittene Zahnfleischentzündung (Parodontitis)

Kritisches Stadium: Schwere Zahnfleischschäden und beeinträchtigte Knochenstruktur

Symptome


Diagnose: Zahnfleischentzündung

Leiden Sie an...?

- Rotem oder geschwellenem Zahnfleisch
- Schmerzen oder Bluten beim Zähneputzen
- Beschwerden beim Kauen
- Einem anhaltenden schlechten Geschmack im Mund

**... dann kann Pocket-X® Gel Ihnen helfen,
Ihre Zahnfleischgesundheit wiederherzustellen.**

Pocket-X® Gel

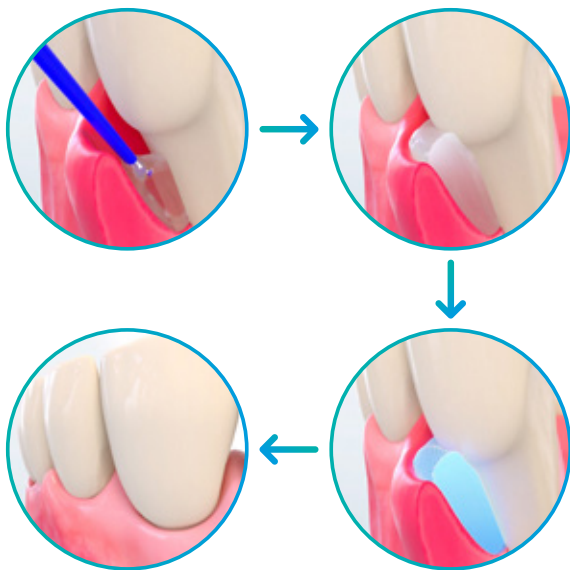

Resultate

- Das Zahnfleisch liegt wieder eng am Zahnhals an und verhindert das Eindringen von Bakterien
- Weniger Entzündungen
- Weniger Zahnfleischbluten

Wie Pocket-X® Gel helfen kann

Pocket-X® Gel wurde speziell entwickelt, um die Behandlung von Zahnfleischerkrankungen zu unterstützen. Es wird nach der Reinigung der parodontalen Zahnfleischtaschen aufgetragen. Die einzigartigen Inhaltsstoffe von Pocket-X® Gel, wie z. B. Hyaluronsäure, unterstützen die Heilung Ihres Zahnfleisches und beugen neuen Entzündungen vor.¹

Ihre Vorteile durch Pocket-X® Gel

1. Sanftes Einbringen

Einfach und schnell, selbst an schwer erreichbaren Stellen.

2. Unkompliziert

Die Behandlung erfordert keinen zusätzlichen Zeitaufwand für Sie. Sie wird nahtlos in Ihren regulären Zahnarztbesuch eingebunden.

3. Wirksamer Schutz

Pocket-X® Gel bildet eine Barriere, um Bakterien fernzuhalten und die Heilung zu fördern.

4. Weniger Entzündungen, gesünderes Zahnfleisch

6 Monate nach der Behandlung mit Pocket-X® Gel ist eine deutliche Verbesserung der Zahnfleischgesundheit zu sehen.²

5. Schonende Behandlung

Kein unangenehmes Gefühl, nur wirksame Pflege.

Referenzen

1 Prudentix Ltd., Israel, IFU 2023

2 Hirsch et al.: Clinical oral investigations vol. 26,4 (2022): 3721-3733

Pocket-X® Gel ist ein patentiertes Medizinprodukt der Klasse IIa (EU), das aus den folgenden Komponenten besteht: Hyaluronsäure, Poloxamer 407, Octenidin und Phenoxyethanol. Es wird von Ihrem Dentalhygieniker oder Zahnarzt angewendet, um die Heilungsphase nach Ihrem Besuch zu unterstützen.

Unterstützen Sie den Heilungsprozess

Am Ende Ihrer Behandlung wurde Pocket-X® Gel angewendet. Befolgen Sie diese einfachen Hinweise, um die Vorteile der Behandlung zu maximieren:



2 Stunden nach der Behandlung nicht essen, ausspülen oder gurgeln



Nach der Behandlung 4 Stunden lang keine Heissgetränke zu sich nehmen



Für 2 Tage nach der Behandlung die Zähne sehr vorsichtig putzen



Für 2 Tage nach der Behandlung keine Hilfsmittel zur Reinigung der Zahnzwischenräume (z. B. Zahnseide) benutzen



Was Sie tun sollten

- Behalten Sie Ihre gute Mundhygiene bei
- Folgen Sie den Empfehlungen Ihres Behandlers
- Vereinbaren Sie Kontrolltermine zur Nachsorge



Hinweise

- Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen ersetzen nicht den ärztlichen Rat Ihres behandelnden Arztes
- Bitte beachten Sie die spezifischen Hinweise Ihres Arztes / Zahnarztes / Dentalhygienikers

Hersteller

Tree of Life Pharma Ltd.
POB 799
Lod 7110604 Israel

Exklusiv hergestellt für

Prudentix Ltd.
POB 799
Lod 7110604 Israel

Vertriebspartner

Geistlich Pharma AG
Bahnhofstrasse 40
6110 Wolhusen
Schweiz
www.geistlich.com

Für mehr Informationen zu
unseren Vertriebspartnern:
www.geistlich-dental.com

